

Gebrauchsanweisung: **LOT** _____



bioCARE Fix – Schutzhandschuh mit Manschette – schwer entflammbar

REF

BCF4775-SE

Größe: S

M

L

XL

Spezialanfertigung

mit Platte (MP) _____

Zweckbestimmung: Zur Fixierung von kooperativen/nicht-kooperativen Patienten mit Selbst- und/oder Fremdgefährdungsneigung. Schutzhandschuh mit Manschette zur Verhinderung von ungewolltem Herausziehen von Schläuchen etc.

Inhalt:

- 1 Schutzhandschuh mit Manschette
- 2 Magnet, - oder Steckschlösser und 1 Schlüssel (nicht bei Solo)

Anleitung:

Ziehen Sie den Schutzhandschuh über Hand des Patienten.



Stecken Sie den Sockel eines Schlosses in die Sockeltasche der Handmanschette. Legen Sie die überstehende Lasche des Handschuhs auf den Sockel. Legen Sie nun die Handmanschette um das Handgelenk. Danach ziehen Sie das Befestigungsband durch die Metallschleufe und führen es zurück zum Sockel.



Nun hängen Sie das Befestigungsband der Handmanschette in den Sockel ein und schliessen ihn mit dem Kopf des Schlosses.



Technische Daten

Manschettenlänge: Größe S – 20 cm, Größe M – 29cm, Größe L – 32cm, Größe XL – 40cm

Handgelenksumfang: Größe S – 8 bis 18cm, Größe M – 12 bis 22cm, Größe L – 17 bis 27 cm, Größe XL – 23 bis 34cm

Gewicht: Größe S – 0,4kg, Größe M – 0,5kg, Größe L – 0,6kg, Größe XL – 0,6kg

Pflegeanweisung:

- Dieser Gurt besteht aus Trevira® CS, ein schwerentflammbares Material nach allen wichtigen internationalen Brandschutznormen.
- Dieser Gurt ist bis 95°C in Waschmaschinen waschbar. Die Lebensdauer der Gurte wird durch niedrige Waschttemperaturen und durch Verwendung eines Wäschenetzes verlängert. Da die Gurte nicht vorgewaschen sind, ist eine Schrumpfung bis zu 8% möglich.
- Waschbar mit allen herkömmlichen Vollwasch-, und zugelassenen Desinfektionswaschmittel. Weiterhin sind sie zur Wisch-, bzw. Sprühdeseinfektion geeignet.
- Waschmittel: nicht aggressiv, kein Bleichmittel, kein Weichspüler.
- Trockner: bei **niedriger** Temperatur.
- Schlösser können mit einem feuchten Tuch und Reinigungsmittel gesäubert werden. Bitte die Schlösser nicht in Flüssigkeit tauchen, da die Sicherheit der Schlösser dann nicht mehr gewährleistet ist.



Befolgen Sie in jedem Fall folgende Hinweise:

1. **Das Anlegen von bioCARE Fix-Systemen darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.**
Bei aufkommenden Zweifeln oder Fragen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit Ihrem Lieferanten oder dem Hersteller auf. Eine fehlerhafte Handhabung bei der Anwendung von bioCARE-Systemen kann schwere Verletzungen hervorrufen und im Extremfall den Tod des Patienten bewirken.
2. Wählen Sie die passende Größe.

„S“ =	dunkelblau	=>	Handgelenksumfang	8 – 18cm
„M“ =	grün	=>	Handgelenksumfang	12 – 22cm
„L“ =	grau	=>	Handgelenksumfang	17 – 27cm
„XL“ =	hellblau	=>	Handgelenksumfang	23 – 34cm
3. Überprüfen Sie das System vor Gebrauch. Verwenden Sie nie beschädigte Produkte, sie können Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie sorgfältig die Verschlussysteme.
4. Legen Sie das bioCARE- System laut Gebrauchsanleitung an und bewahren Sie diese sicher auf.
5. Ein Patient in Fixierung erfordert eine regelmäßige und patientenindividuelle Überwachung. Halten Sie dies dokumentarisch fest.
6. Bei Patienten mit einem Herzschrittmacher muss der Abstand zwischen dem Magnetschlüssel und dem Schrittmacher mindestens 15 cm aufweisen, um Interferenzen und Herzrhythmusstörungen zu vermeiden. In diesem Fall kann der Thorax mit Steckschlössern gesichert werden.
7. Die Köpfe des Magnetschlösses dürfen nur auf die Sockel für Magnetschlösser. Gleiches gilt für das Stecksystem, da ansonsten die Schlösser nicht mehr geöffnet werden können.
8. Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Nähe des Patienten, die zu einer Selbstverletzung oder Beschädigung des Fixiergurtens führen könnten.

