

Gebrauchsanleitung

Antirutschmatte

alpha 
TRANSFERHILFEN



PM-7010 / PM-7011

blue 
MOTION
TRANSFERHILFEN



BM-7005



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch!
WARNUNG kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnte.

1. Technische Daten und Lieferumfang

Bestell-Nr.: PM-7010
Farbe: rot
 Verpackungseinheit: 1 Stück
 Abmessung: 350 x 250 mm
 ILN: 4250355370105

Bestell-Nr.: PM-7011
Farbe: rot
 Verpackungseinheit: 1 Stück
 Abmessung: 450 x 380 mm
 ILN: 4250355370112

Bestell-Nr.: BM-7005
Farbe: blau
 Verpackungseinheit: 10 Stück
 Abmessung: 255 x 355 mm
 ILN: 4250355370051

Material: Dickfolie, latexfrei
Lagerung: -5 – 40° C
 vor Sonneneinstrahlung
 schützen


Lieferumfang:

- Antirutschmatte
- Gebrauchsanleitung

Made in Europe



max.
200 kg

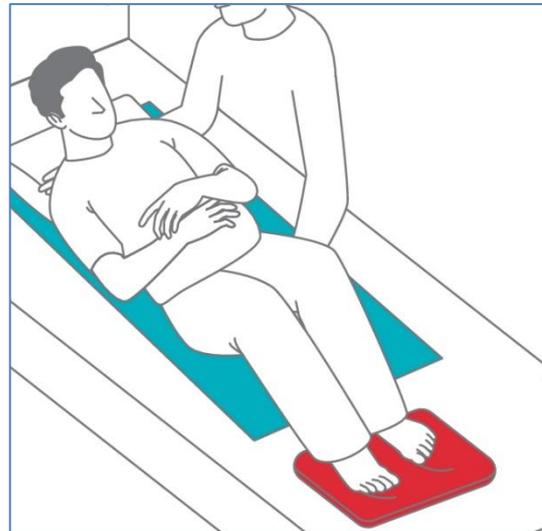

2. Anwendung / Platzierung

Die Antirutschmatte ist eine rechteckige Matte aus rutschfester, reißfester und sehr belastbarer Dickfolie. Die Antirutschmatte haftet auf jeder trockenen Fläche im Klinik- und Krankenhausbereich, besonders auf textilen Unterlagen. Sie wird dort eingesetzt, wo Oberflächen aufgrund des mangelnden Reibungswiderstandes eine professionelle, rückengerechte Pflege erschweren. Patienten, die noch Restaktivität in den Beinen und Armen haben, können so z. B. beim Bewegen zum Kopfende im Bett ihre Ressourcen mit nutzen und die noch vorhandene Mobilität erhalten.

Dieses Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet.

3. Wartung / Pflege

Das Produkt bedarf keiner besonderen Wartung. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt ggf. mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch nach.

Zur Schnelldesinfektion der Antirutschmatte können Sie sowohl Desinfektionstücher mit den Markenbezeichnungen „Bacillol Tissues“ so wie „Cleanisept Wipes“ verwenden. Als flüssiges Desinfektionsmittel kann das Produkt „Antifect AF“ eingesetzt werden. Bei Benutzung dieses flüssigen Desinfektionsmittels achten Sie bitte darauf, dass Sie es mit korrekter Dosierung verwenden.

4. Garantie

- Die Firma Petermann garantiert, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist.
- Die Garantieleistung bezieht sich auf einen Zeitraum von **1 Jahr**. Diese erstreckt sich nicht auf Mängel, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Die auf ein Jahr beschränkte Petermann-Garantie ist eine freiwillige Garantie des Herstellers. Sie gewährt zusätzliche Rechte unabhängig von den durch Verbraucherschutzgesetze gewährten Rechten. Diese gesetzlichen Rechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.
- Die Firma Petermann ist nicht für zufällige oder mittelbare Verletzung bzw. Sachschäden haftbar.

5. Sicht- und Funktionskontrolle / Sicherheitshinweise / Wiedereinsatz

Auch Umlagerungsprodukte unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess. Überprüfen Sie die Hilfsmittel regelmäßig und sorgfältig und unbedingt vor jedem Wiedereinsatz. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem einwandfreien Zustand ist und das Material nicht beschädigt ist. Das spezielle Antirutschmaterial verhindert durch seine Haftfläche ein Wegrutschen. Überprüfen Sie diese Eigenschaften – am besten im Vergleich mit einem neuen Produkt.

Vor dem Wiedereinsatz muss das Produkt gewaschen und desinfiziert werden, siehe 3.

WARNUNG:

- **Defekte Produkte dürfen nicht mehr verwendet werden.**
- **Nach dem Transfer / Positionswechsel die Antirutschmatte unter dem Patienten entfernen.**
- **Bei eingeschränkter Mobilität sichern Sie unbedingt den Bewegungsablauf des Transfers mit vertrauter Hilfe.**
- **Bei Verwendung von nicht handelsüblichen Reinigungsmitteln bzw. Bleichmitteln, oder anderen chemischen Reinigungszusätzen können sich die Funktionseigenschaften des Produktes nachhaltig verschlechtern.**

6. Lebenszyklus

Wenn das Produkt gemäß den Sicherheitsvorschriften bestimmungsgemäß und an einem Patienten verwendet wird, beträgt die zu erwartende Produktlebensdauer **drei Jahre**. Die effektive Lebensdauer kann jedoch, abhängig von der Häufigkeit und Intensität des Gebrauchs, der Anzahl der Wasch- und Desinfektionsvorgänge variieren.

Führen Sie regelmäßig eine Funktionskontrolle mit dem Produkt durch und beachten Sie unbedingt die Warnhinweise (siehe 5).

7. Produktkennzeichnung

Die Antirutschmatte ist ein Medizinprodukt der Klasse I und entspricht den Bestimmungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG.

Die Petermann GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 vom TÜV Süd.

8. Entsorgungshinweis

Für die Antirutschmatte besteht keine besondere Entsorgungsvorschrift; sie kann ggf. gemäß nationalen und örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Falls Sie Fragen zum Gebrauch unserer Produkte haben, wenden Sie sich bitte an unsere Servicenummer:

+49 (0) 9868 9339-0

Petermann GmbH • Waldweg 3 • D-91601 Dombühl
Telefon: +49 (0) 9868 9339-0 • Telefax: +49 (0) 9868 9339-20
E-Mail: petermann@pm-med.de • www.pm-med.de

„Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen an unseren Produkten sowie Farbabweichungen oder Druckfehler“