

# PLUSCUR® Flexi Depth Wundtiefenmesser

Steriles Produkt. Mit Ethylenoxid sterilisiert. Einwegprodukt. Beim Öffnen des Produktes die Umverpackung auf Sterilität prüfen. Bei beschädigter bzw. geöffneter Verpackung Produkt auf Unversehrtheit prüfen.

## BESCHREIBUNG

PLUSCUR® Flexi Depth ist ein flexibler Messstab aus medizinischen PVC, der durch manuelle Verformung an die Wunde angepasst werden kann. Das abgerundete Ende gewährleistet eine atraumatische Messung im Wundgrund und dies auch bei Fistelgängen und Wundtaschen. Der PLUSCUR® Flexi Depth verfügt über einen 15 cm langen Tiefenanzeiger mit einer Einteilung zu je 1 mm Schritten. Die Zahlen von 1-15 cm geben jeweils die Messung in cm-Schritten wider. ZWECKBESTIMMUNG: PLUSCUR® Flexi Depth ist ein Wundtiefenmesser zur Messung der Tiefe einer Wunde durch medizinisches Fachpersonal. Die einzigartige Flexibilität ermöglicht eine Messung im tiefsten Teil der Wunde, auch Fistelgänge oder Wundtaschen können mühelos abgemessen werden. Nach dem Einführen des PLUSCUR® Flexi Depth bis zum Wundbett kann am Messstab die Wundtiefe abgelesen werden. Die Messung dient im Rahmen einer kontinuierlichen Dokumentation zur Messung und Beobachtung der Wundheilung aus der Tiefe.

Neben der Wundtiefe sollten auch immer die Wundbreite, Wundlänge und die Wundausrichtung an dem jeweiligen Körperteil angegeben werden. Für die fachgerechte Ausmessung der Wunde, wie beschrieben, verwenden sie bitte ein Wundlineal.

## ANWENDUNGSGEBIET:

PLUSCUR® Flexi Depth kann bei allen Wundarten zur Bestimmung der Wundtiefe genutzt werden.

## GEBRAUCHSANWEISUNG PLUSCUR® Flexi Depth

1. **Reinigung:** Die Wunde einer sach- und fachgerechten Reinigung unterziehen. Anschließend die Sterilverpackung am oberen Ende (15 cm) vorsichtig öffnen, PLUSCUR® Flexi Depth entnehmen. Bitte sterile Kautelen beachten.
2. **Vermessung:** PLUSCUR® Flexi Depth sollte mit geringem Druck und senkrecht zum Wundbett in die Wunde eingeführt werden.
3. **Markierung:** Die gemessene Stelle am PLUSCUR® Flexi Depth / Hautniveau markieren.
4. **Entsorgung:** PLUSCUR® Flexi Depth fachgerecht entsorgen.

## VORSICHTSMASSNAHMEN:

- PLUSCUR® Flexi Depth ist für die einmalige Anwendung geeignet und daher nicht wieder aufzubereiten. Warnung vor Kreuzkontamination.
- Das abgerundete Ende ist für die Einführung in die Wunde gedacht, bitte nicht das Endstück des PLUSCUR® Flexi Depth in die Wunde einführen.
- Das abgerundete Ende unter möglichst geringem Druck in die Wunde einführen und auf dem Wundbett aufsetzen.

## ZU BEACHTEN:

- Steriles Einwegprodukt
- Vor Nässe und Sonneneinstrahlung schützen
- Nicht über 25 °C lagern



Flexible Wundtiefenmessung



Tiefenmessung in cm

Art.-Nr.:	P206080
AEP:	36,80 €
PZN:	12370222
Packungsgröße:	10 Stk.



Neu im Vertrieb durch:

## FORLIFE

Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH  
Wendenschloßstraße 142 · 12557 Berlin  
mail@forlife-produkte.de · www.forlife.info

**FORLIFE**  
BERLIN