

Gebrauchsanleitung für Hammerlit Infektionswagen PECO / TECO

1. Allgemein, Zweckbestimmung

Der Hammerlit Infektionswagen PECO / TECO ist für Pflegearbeiten in Krankenhäusern und Altenheimen konzipiert. Er ist stationär und mobil einsetzbar.

Maße und Gewicht des PECO / TECO je nach Ausführung.

2. Rollen

4 Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller.

3. Zubehör

Zubehör und Anbauteile können die äußeren Abmaße des PECO / TECO vergrößern. Wenn Anbauteile über die Kontur des Wagens hinausragen, ist beim Verfahren des PECO / TECO zu bedenken, dass diese bei Kollisionen nicht geschützt sind und entweder die Anbauteile oder andere Gegenstände beschädigt werden könnten.



4. Sicherheitshinweise

- Der PECO / TECO darf nur auf ebenen Böden bewegt werden. Bodenhindernisse, z. B. bei Fahrstühlen, Bodenschwellen, etc., dürfen nur mit äußerster Vorsicht überfahren werden.
- Wird der PECO / TECO bewegt, muss die Tür geschlossen sein.
- Die Feststeller der Rollen immer betätigen, sobald der PECO / TECO abgestellt wird! Ein unbeabsichtigtes Wegrollen wird so vermieden.

5. Reinigung

Modell PECO:

Desinfektion des PX durch Wischdesinfektion mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln, die für empfindliche Oberflächen geeignet sind, weiterhin *Bacillol AF*, *Lysoformin spezial*, *Lysoformin*, *Aldasan 2000*, *Amocid*, *Meliseptol Foam pure*, *Ultrasol F*, *Incidin Plus* und *Distel High Level Medical Surface Disinfectant*.

Bei Reinigung und Desinfektion nur nebelfeucht wischen! Eventuelle Flüssigkeitsansammlungen unverzüglich entfernen! Beachten Sie die Dosierungsvorgaben der Desinfektionsmittelhersteller. Verwenden Sie keine Reinigungswerkzeuge, welche die Oberfläche beschädigen können. Beschädigte Oberflächen bitte schnellstmöglich durch ein geeignetes Reparaturmittel wieder gegen eindringende Flüssigkeiten verschließen.

Modell TECO:

Wie PECO, jedoch können die Oberflächen statt nebelfeucht auch nass gewischt werden.

6. Wartung

Zur Sicherheit den PECO / TECO regelmäßig auf äußere Schäden prüfen sowie halbjährlich alle Schraubverbindungen auf festen Sitz hin kontrollieren.

Hammerlit GmbH
Sägemühlenstraße 49
D-26789 Leer
Tel. +49 (0)491 9292 100
<http://www.hammerlit.de>
info@hammerlit.de

03.2017