

bioCARE Fix – Fußgelenkfixation

REF BCF4300
 BCF4800

Größe: S
 M
 L
 XL

Spezialanfertigung

bioActive 

Der Gurt ist nur in einem Kranken- bzw. Pflegebett anzuwenden!!!

Zweckbestimmung: Zur Fixierung von kooperativen/nicht-kooperativen Patienten mit Selbst- und/oder Fremdgefährdungsneigung. Flexible Fußgelenkfixation zur Fixierung eines oder beider Fußgelenke.

Inhaltsangabe:

- 2 Fußgelenkfixationen
- 1 Verbindungsgurt
- 4 Magnet -, oder Steckschlösser und 1 Schlüssel (nicht bei BCF4800)

Anleitung:



Legen Sie den Verbindungsgurt auf Höhe der Fußgelenke auf das Bett. Stecken Sie, je Seite, einen Sockel des Schloßes in die dafür vorgesehenen Sockeltaschen. Führen Sie nun die Enden des Verbindungsgurtes um das Bettgestell, wenn möglich am beweglichen Fußteil, herum. Nun die Enden in die Sockel einhängen und mit dem Kopf des Schloßes verschließen. Der Verbindungsgurt muss dabei fest auf der Matratze liegen.



Achtung: Eine Fixierung der Extremitäten darf nur in Verbindung mit einem zugelassenen Bauchgurt erfolgen, um Verletzungen zu vermeiden.

In die Sockeltasche an der Manschette der Fußgelenkfixation wird ebenfalls ein Sockel des Schloßes gesteckt. Legen Sie die Manschette um das Fußgelenk. Fädeln Sie das Befestigungsband der Manschette durch die Metallschleife und führen es danach zum Sockel des Schloßes zurück. Nun hängen Sie das Befestigungsband in den Sockel ein und schließen ihn mit dem Kopf des Schloßes.

Achtung: Die Fixierung muss fest um das Fußgelenk sein. Allerdings muss die Blutzufuhr weiterhin gewährleistet sein. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Manschette ebenmäßig um das Fußgelenk liegt, um Druckstellen zu vermeiden.



Fädeln Sie das Bettbefestigungsband durch die Metallschleufe des Verbindungsgurtes. Öffnen Sie das Schloss am Verbindungsgurt: Hängen Sie je nach gewünschter Bewegungsfreiheit das Befestigungsband ein und schliessen das Schloss erneut. Eventuell muss dafür das Befestigungsband ebenfalls um das Bettgestell geführt werden (wenn möglich am beweglichen Fußteil).

Technische Daten

Manschettenlänge: Größe S - 26 cm, Größe M – 32cm, Größe L – 40cm, Größe XL – 48cm

Handgelenksumfang: Größe S – 11 bis 22cm, Größe M – 19 bis 28cm, Größe L – 25 bis 35 cm, Größe XL – 31 bis 43cm

Gewicht: Größe S – 0,4kg, Größe M – 0,4kg, Größe L – 0,5kg, Größe XL – 0,5kg

Pflegeanweisung:

- Dieser Gurt besteht aus 50% Baumwolle / 50% Polyester.
- Dieser Gurt ist bis 95°C in Waschmaschinen waschbar. Die Lebensdauer der Gurte wird durch niedrige Waschttemperaturen und durch Verwendung eines Wäschenetzes verlängert. Da die Gurte nicht vorgewaschen sind, ist eine Schrumpfung bis zu 8% möglich.
- Waschbar mit allen herkömmlichen Vollwasch-, - und zugelassenen Desinfektionswaschmittel. Weiterhin sind sie zur Wisch-, - bzw. Sprühdesinfektion geeignet.
- Waschmittel: nicht aggressiv, kein Bleichmittel, kein Weichspüler.
- Trockner: bei **niedriger** Temperatur.
- Schlösser können mit einem feuchten Tuch und Reinigungsmittel gesäubert werden. Bitte die Schlösser nicht in Flüssigkeit tauchen, da die Sicherheit der Schlösser dann nicht mehr gewährleistet ist.



WARNUNG!



Befolgen Sie in jedem Fall folgende Hinweise:

1. Das Anlegen von bioCARE Fix-Systemen darf nur durch geschultes Personal erfolgen.

Bei aufkommenden Zweifeln oder Fragen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit Ihrem Lieferanten oder dem Hersteller auf. Eine fehlerhafte Handhabung bei der Anwendung von bioCARE-Systemen kann schwere Verletzungen hervorrufen und im Extremfall den Tod des Patienten bewirken.

2. Wählen Sie die passende Größe.

„S“ =	dunkelblau	=>	Fußgelenksumfang	11 – 22cm
„M“ =	grün	=>	Fußgelenksumfang	19 – 28cm
„L“ =	grau	=>	Fußgelenksumfang	25 – 35cm
„XL“ =	hellblau	=>	Fußgelenksumfang	31 – 43cm

3. Überprüfen Sie das System vor Gebrauch. Verwenden Sie nie beschädigte Produkte, sie können Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie sorgfältig die Verschlussysteme.

4. bioCARE-Systeme dürfen nicht auf Wechseldruckmatratzen eingesetzt werden, da hier die Sicherheit des Patienten gefährdet, sowie die Funktionstüchtigkeit der Matratze beeinflusst wird.

5. Legen Sie das bioCARE- System laut Gebrauchsanleitung an und bewahren Sie diese sicher auf.

6. Das bioCARE-System muss fest ans Bett angebracht werden. Ein Verrutschen darf nicht erfolgen; nicht an scharfen Kanten anbringen; an die Bewegungsmechanismen anpassen.

7. Eine Fixierung der Extremitäten darf nur in Verbindung mit einem zugelassenen Bauchgurt erfolgen, um Verletzungen zu vermeiden.

8. Ein Patient in Fixierung erfordert eine regelmäßige und patientenindividuelle Überwachung. Halten Sie dies dokumentarisch fest.

9. Die Köpfe des Magnetschlösses dürfen nur auf die Sockel für Magnetschlösser. Gleiches gilt für das Stecksystem, da ansonsten die Schlösser nicht mehr geöffnet werden können.

10. Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Nähe des Patienten, die zu einer Selbstverletzung oder Beschädigung des Fixiergurtes führen könnten.

Alle bioCARE Bettfixationssysteme sind mit den Krankenhausbetten, die der DIN EN 60601-2-38 und DIN EN 60601-2-52 Norm entsprechen, anwendbar. Die Systeme sind bei einer Matratzenstärke von bis zu 25cm und Bettenbreite bis zu 100cm anwendbar.

