

bioCARE Fix – Handgelenkfixation

REF

- BCF4200
 BCF4700

- Größe: S
 M
 L
 XL

- Spezialanfertigung

- bioActive 

Der Gurt ist nur in einem Kranken- bzw. Pflegebett anzuwenden!!!

Zweckbestimmung: Zur Fixierung von kooperativen/nicht-kooperativen Patienten mit Selbst- und/oder Fremdgefährdungsneigung. Flexible Handgelenkfixation zur Fixierung eines oder beider Handgelenke.

Inhaltsangabe:

- 2 Handgelenkfixationen
- 4 Magnet -, oder Steckschlösser und 1 Schlüssel (nicht bei BCF4700)

Anleitung:



Legen sie die Handgelenkfixation auf Höhe der Handgelenke auf das Bett. Führen Sie das Bettbestigungsband der Handgelenkfixation von innen nach außen um das Bestellgestell herum. Stecken Sie den Sockel eines Schlosses in die dafür vorgesehene Sockeltasche. Hängen Sie nun das Bettbefestigungsband, je nach gewünschter Bewegungsfreiheit, in den Sockel ein und verschliessen es mit dem Kopf des Schlosses.



Achtung: Eine Fixierung der Extremitäten darf nur in Verbindung mit einem zugelassenen Bauchgurt erfolgen, um Verletzungen zu vermeiden.


Achtung: Wenn sich der Gurt aufgrund der Größe des Patienten im Bereich des beweglichen Kopfteiles befindet – muss dieser dort befestigt werden.



Stecken Sie den Sockel eines Schlosses in die Sockeltasche der Handmanschette. Legen Sie nun die Handmanschette um das Handgelenk. Danach ziehen Sie das Befestigungsband durch die Metallschleufe und führen es zurück zum Sockel. Nun hängen Sie das Befestigungsband der Handmanschette in den Sockel ein und schliessen ihn mit dem Kopf des Schlosses.

Achtung: Die Fixierung muss fest um das Handgelenk sein. Allerdings muss die Blutzufuhr weiterhin gewährleistet sein. Des weiteren ist darauf zu achten, dass die Manschette ebenmäßig um das Handgelenk liegt, um Druckstellen zu vermeiden.

Optionale Befestigung der Handgelenkfixation in Verbindung mit Standard Bauchgurt (BCF4100/BCF4101) und Kombifix® (BCF7125)

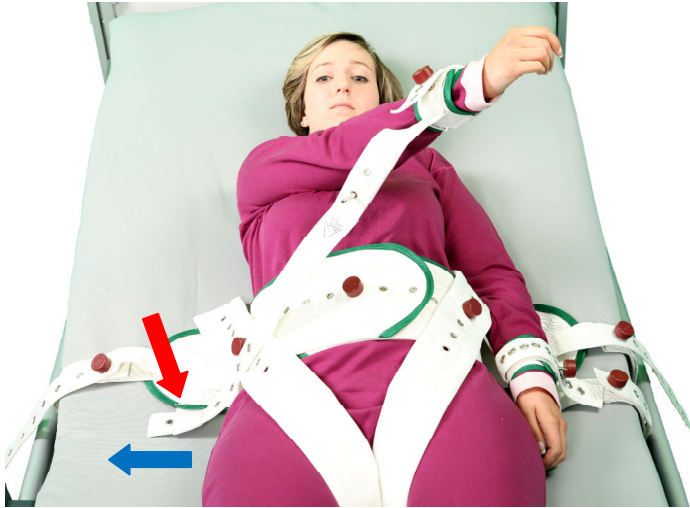

Um die Bewegungsfreiheit der Person weiter einzuschränken ziehen Sie das Bettbefestigungsband durch die dafür vorgesehene Schlaufe am Bauchgurt.

Führen Sie das Bettbestigungsband der Handgelenkfixation von innen nach außen um das Bestellgestell herum. Stecken Sie den Sockel eines Schloßes in die dafür vorgesehene Sockeltasche. Hängen Sie nun das Bettbefestigungsband in den Sockel ein und verschliessen es mit dem Kopf des Schloßes.

Technische Daten

Manschettenlänge: Größe S - 20 cm, Größe M – 29cm, Größe L – 32cm, Größe XL – 40cm

Handgelenksumfang: Größe S – 8 bis 18cm, Größe M – 12 bis 22cm, Größe L – 17 bis 27 cm, Größe XL – 23 bis 34cm

Gewicht: Größe S – 0,4kg, Größe M – 0,4kg, Größe L – 0,5kg, Größe XL – 0,5kg

Pflegeanweisung:

- Dieser Gurt besteht aus 50% Baumwolle/ 50% Polyester.
- Dieser Gurt ist bis 95°C in Waschmaschinen waschbar. Die Lebensdauer der Gurte wird durch niedrige Waschttemperaturen und durch Verwendung eines Wäschenetzes verlängert. Da die Gurte nicht vorgewaschen sind, ist eine Schrumpfung bis zu 8% möglich.
- Waschbar mit allen herkömmlichen Vollwasch-, - und zugelassenen Desinfektionswaschmittel. Weiterhin sind sie zur Wisch-, - bzw. Sprühdeseinfektion geeignet.
- Waschmittel: nicht aggressiv, kein Bleichmittel, kein Weichspüler.
- Trockner: bei **niedriger** Temperatur.
- Schlösser können mit einem feuchten Tuch und Reinigungsmittel gesäubert werden. Bitte die Schlösser nicht in Flüssigkeit tauchen, da die Sicherheit der Schlösser dann nicht mehr gewährleistet ist.



WARNUNG!

Befolgen Sie in jedem Fall folgende Hinweise:

- 1. Das Anlegen von bioCARE Fix-Systemen darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.** Bei aufkommenden Zweifeln oder Fragen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit Ihrem Lieferanten oder dem Hersteller auf. Eine fehlerhafte Handhabung bei der Anwendung von bioCARE-Systemen kann schwere Verletzungen hervorrufen und im Extremfall den Tod des Patienten bewirken.
- 2. Wählen Sie die passende Größe.**

„S“ =	dunkelblau	=>	Handgelenksumfang	8 – 18cm
„M“ =	grün	=>	Handgelenksumfang	12 – 22cm
„L“ =	grau	=>	Handgelenksumfang	17 – 27cm
„XL“ =	hellblau	=>	Handgelenksumfang	23 – 34cm
- 3. Überprüfen Sie das System vor Gebrauch.** Verwenden Sie nie beschädigte Produkte, sie können Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie sorgfältig die Verschlussysteme.
- 4. bioCARE-Systeme dürfen nicht auf Wechsellagermatratzen eingesetzt werden, da hier die Sicherheit des Patienten gefährdet, sowie die Funktionstüchtigkeit der Matratze beeinflusst wird.**
- 5. Legen Sie das bioCARE- System laut Gebrauchsanleitung an und bewahren Sie diese sicher auf.**
- 6. Das bioCARE-System muss fest ans Bett angebracht werden.** Ein Verrutschen darf nicht erfolgen; nicht an scharfen Kanten anbringen; an die Bewegungsmechanismen anpassen.
- 7. Eine Fixierung der Extremitäten darf nur in Verbindung mit einem zugelassenen Bauchgurt erfolgen,** um Verletzungen zu vermeiden.
- 8. Ein Patient in Fixierung erfordert eine regelmäßige und patientenindividuelle Überwachung.** Halten Sie dies dokumentarisch fest.
- 9. Die Köpfe des Magnetschlösses dürfen nur auf die Sockel für Magnetschlösser.** Gleiches gilt für das Stecksystem, da ansonsten die Schlösser nicht mehr geöffnet werden können.
- 10. Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Nähe des Patienten,** die zu einer Selbstverletzung oder Beschädigung des Fixiergurtes führen könnten.

Alle bioCARE Bettfixationssysteme sind mit den Krankenhausbetten, die der DIN EN 60601-2-38 und DIN EN 60601-2-52 Norm entsprechen, anwendbar. Die Systeme sind bei einer Matratzenstärke von bis zu 25cm und Bettenbreite bis zu 100cm anwendbar.