

Gebrauchsanweisung: **LOT** _____



bioCARE CLIP – Basis Klett

REF BCC5125

Größe: Normal XL

Zweckbestimmung: Sicherungssystem mit Klettverschluss, für Personen im (Roll-) Stuhl. Dient als Sicherung bei leichter Instabilität des Patienten.

Inhalt:

- 1 Basis Klett

Anleitung:



Patient in den (Roll-) Stuhl setzen. Der Basis Klett wird um den Bauch des Patienten sowie um die Rückenlehne des (Roll) Stuhles geführt.



Danach wird der Gurt mit dem Klettverschluss und dem Verschlussband gesichert.



Technische Daten

Bauchgurtbreite: 15cm
Oberstoff: 100% Baumwolle – Abwaschbar (beschichtet)
Polsterung: Schaumstoff
Umfangbereich: Normal: 110 – 140cm, XL: 140 – 170cm
Gewicht: Normal – 0,2kg, XL – 0,3kg

Pflegeanweisung:

- Dieser Gurt ist bis 60°C in Waschmaschinen waschbar. Die Lebensdauer der Gurte wird durch niedrige Waschttemperaturen und durch Verwendung eines Wäschenetzes verlängert. Da die Gurte nicht vorgewaschen sind, ist eine Schrumpfung möglich.
- Waschbar mit allen herkömmlichen Vollwasch-, - und zugelassenen Desinfektionswaschmittel. Weiterhin sind sie zur Wisch-, - bzw. Sprühdeseinfektion geeignet.
- Waschmittel: nicht aggressiv, kein Bleichmittel, kein Weichspüler.
- Nicht trocknergeignet, nicht mangeln



Befolgen Sie in jedem Fall folgende Hinweise:

- 1. Das Anlegen von bioCARE Clip-Systemen darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.**
Bei aufkommenden Zweifeln oder Fragen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit Ihrem Lieferanten oder dem Hersteller auf. Eine fehlerhafte Handhabung bei der Anwendung von bioCARE-Systemen kann schwere Verletzungen hervorrufen und im Extremfall den Tod des Patienten bewirken.
- 2. Wählen Sie die passende Größe.**

„Normal“	=	dunkelblau	=>	Umfang 110 – 140 cm
„XL“	=	grau	=>	Umfang 140 – 170 cm
- 3. Überprüfen Sie das System vor Gebrauch. Verwenden Sie nie beschädigte Produkte, sie können Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie sorgfältig die Verschlussysteme.**
- 4. Legen Sie das bioCARE - System laut Gebrauchsanleitung an und bewahren Sie diese sicher auf.**
- 5. Das bioCARE-System muss fest am (Roll-) Stuhl angebracht werden. Ein Verrutschen darf nicht erfolgen; nicht an scharfen Kanten anbringen; an die Bewegungsmechanismen anpassen.**
- 6. Sofern der Patient nicht selbstständig in der Lage ist sich fortzubewegen, müssen die Bremsen am Rollstuhl angezogen sein.**

