

bioCARE CLIP – Komplett Klett

REF BCC5100

Größe: Normal XL

Zweckbestimmung: Sicherungssystem für Hüfte, Oberkörper und Becken mit Klett- und Clipverschluss, für Personen im (Roll-) Stuhl mit instabilem Ober- und Unterkörper.

Inhalt:

- 1 Komplett Klett

Anleitung:



Bevor der Patient im (Roll) Stuhl sitzt, die Sitzhose auf die Stuhlfläche legen und das Befestigungsband nach hinten führen. Danach den Patienten wie gewohnt in den (Roll) Stuhl setzen.



Nun den Bauchgurt und die Weste des Komplett Kletts über den Patienten legen. Der Bauchgurt wird um das Becken des Patienten sowie um die Rückenlehne des (Roll) Stuhles geführt. Danach wird der Gurt mit dem Klettverschluss und dem Verschlussband gesichert.



Jetzt den Gurt der Sitzhose mit dem unteren Clip des Bauchgurtes sichern. Die Gurte der Weste werden über beide Schultern geführt, auf der Rückseite des Stuhles überkreuzt und mit den beiden oberen Clipverschlüssen am Bauchgurt gesichert .

Danach die Befestigungsbänder auf gewünschte Festigkeit einstellen.



Technische Daten

Bauchgurtbreite: 15cm

Oberstoff: 100% Baumwolle

Polsterung: Schaumstoff

Umfangbereich: Normal: 110 – 140cm, XL: 140 – 170cm

Gewicht: Normal – 0,4kg, XL – 0,5kg

Pflegeanweisung:

- Dieser Gurt ist bis 60°C in Waschmaschinen waschbar. Die Lebensdauer der Gurte wird durch niedrige Waschttemperaturen und durch Verwendung eines Wäschenetzes verlängert. Da die Gurte nicht vorgewaschen sind, ist eine Schrumpfung möglich.
- Waschbar mit allen herkömmlichen Vollwasch-, - und zugelassenen Desinfektionswaschmittel. Weiterhin sind sie zur Wisch-, - bzw. Sprühdeseinfektion geeignet.
- Waschmittel: nicht aggressiv, kein Bleichmittel, kein Weichspüler.
- Nicht trocknergeeignet, nicht mangeln



Befolgen Sie in jedem Fall folgende Hinweise:

- 1. Das Anlegen von bioCARE Clip-Systemen darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.**
Bei aufkommenden Zweifeln oder Fragen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit Ihrem Lieferanten oder dem Hersteller auf. Eine fehlerhafte Handhabung bei der Anwendung von bioCARE-Systemen kann schwere Verletzungen hervorrufen und im Extremfall den Tod des Patienten bewirken.
- 2. Wählen Sie die passende Größe.**

„Normal“	=	dunkelblau	=>	Umfang 110 – 140 cm
„XL“	=	grau	=>	Umfang 140 – 170 cm
- 3. Überprüfen Sie das System vor Gebrauch. Verwenden Sie nie beschädigte Produkte, sie können Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie sorgfältig die Verschlussysteme.**
- 4. Legen Sie das bioCARE - System laut Gebrauchsanleitung an und bewahren Sie diese sicher auf.**
- 5. Das bioCARE-System muss fest am (Roll-) Stuhl angebracht werden. Ein Verrutschen darf nicht erfolgen; nicht an scharfen Kanten anbringen; an die Bewegungsmechanismen anpassen.**
- 6. Sofern der Patient nicht selbstständig in der Lage ist sich fortzubewegen, müssen die Bremsen am Rollstuhl angezogen sein.**