



**bioCARE CLIP – Sitzhose Soft**

**REF** BCS5177

**Zweckbestimmung:** Sicherungssystem für das Becken mit Klett- und Clipverschluss, für Personen im (Roll-) Stuhl mit instabilem Unterkörper. Verhindert das Herausrutschen aus dem (Roll-) Stuhl.

**Inhalt:**

- 1 Sitzhose Soft

**Anleitung:**



Bevor der Patient im (Roll) Stuhl sitzt, die Sitzhose auf die Stuhlfläche legen. Danach den Patienten wie gewohnt in den (Roll) Stuhl setzen und das Klettband hinter der Rückenlehne verschliessen.



Die Beckenbänder werden Seitengleich an der Innenseite der Oberschenkel entlang nach hinten geführt. Hinter der Rückenlehne wird der Clipverschluss geschlossen und die Beckenbänder auf die gewünschte Festigkeit eingestellt.



## Technische Daten

Polsterung: Wirkvelour

Gewicht: Normal – 0,2kg, XL – 0,3kg



## Pflegeanweisung:

- Dieser Gurt ist bis 60°C in Waschmaschinen waschbar. Die Lebensdauer der Gurte wird durch niedrige Waschttemperaturen und durch Verwendung eines Wäschenetzes verlängert. Da die Gurte nicht vorgewaschen sind, ist eine Schrumpfung möglich.
- Waschbar mit allen herkömmlichen Vollwasch-, - und zugelassenen Desinfektionswaschmittel. Weiterhin sind sie zur Wisch-, - bzw. Sprühdeseinfektion geeignet.
- Waschmittel: nicht aggressiv, kein Bleichmittel, kein Weichspüler.
- Nicht trocknergeeignet, nicht mangeln



## Befolgen Sie in jedem Fall folgende Hinweise:

- 1. Das Anlegen von bioCARE Clip-Systemen darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.**  
Bei aufkommenden Zweifeln oder Fragen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit Ihrem Lieferanten oder dem Hersteller auf. Eine fehlerhafte Handhabung bei der Anwendung von bioCARE-Systemen kann schwere Verletzungen hervorrufen und im Extremfall den Tod des Patienten bewirken.
- 2. Überprüfen Sie das System vor Gebrauch. Verwenden Sie nie beschädigte Produkte, sie können Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie sorgfältig die Verschlussysteme.**
- 3. Legen Sie das bioCARE - System laut Gebrauchsanleitung an und bewahren Sie diese sicher auf.**
- 4. Das bioCARE-System muss fest am (Roll-) Stuhl angebracht werden. Ein Verrutschen darf nicht erfolgen; nicht an scharfen Kanten anbringen; an die Bewegungsmechanismen anpassen.**
- 5. Sofern der Patient nicht selbstständig in der Lage ist sich fortzubewegen, müssen die Bremsen am Rollstuhl angezogen sein.**



Märkerstrasse 8  
D-56317 Urbach  
E-mail: [info@buw-biocare.com](mailto:info@buw-biocare.com)

Fon: +49 (0) 2689-9273-0  
Fax: +49 (0) 2689-9273-11  
Internet: [www.buw-biocare.com](http://www.buw-biocare.com)