


Gebrauchsanweisung EL-2A
UDI-DI: 643007748EL2A90YY

Verkauf:
WIBU Pflegeplus GmbH
Gerstenstieg 6
D-22926 AHRENSBURG
Tel: +49 4102 483-8 280
www.wibu-shop.de
Art.-Nr.: 800493

Hersteller:
SUOMEN LAITOSTEKSTIILIT KY
Laajakaista 3 B, ovi E
FI-96400 ROVANIEMI
FINNLAND
Tel: +358-40-7778000
E-Mail: info@suomenlaitostekstiilit.com
www.suomenlaitostekstiilit.com

Produkt: Evakuierungstuch EL-2A

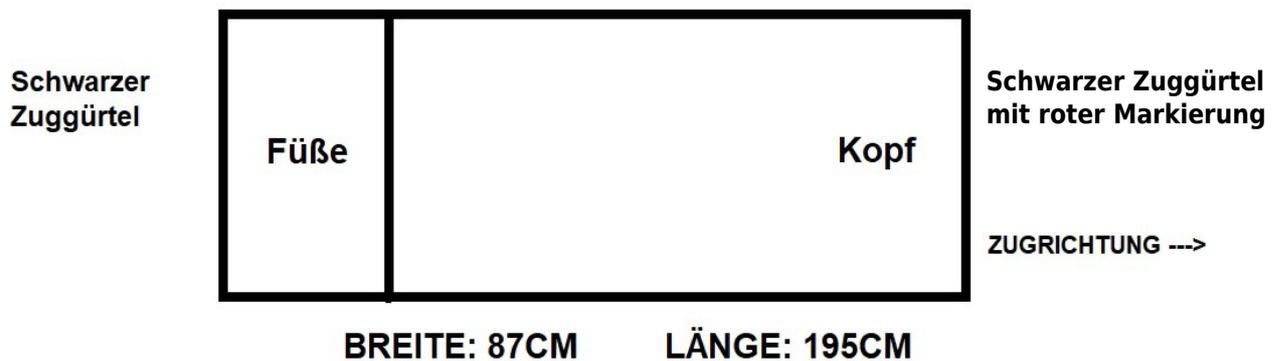

Einbauanleitung:

Das Evakuierungstuch EL-2A wird unter die Matratze gelegt. Bei Bedarf werden die Klettbänder über der Matratze und dem Patienten befestigt und der Patient wird in Sicherheit gezogen.

- 1) Die Oberseite ist die Seite, in der sich die Gummibänder befinden.
- 2) Legen Sie die Klettbänder seitlich in die Ecken und befestigen Sie sie mit kleinen Gummibändern.
Anleitung: YouTube: „<https://youtu.be/8EqAbRHughU>“
- 3) Legen Sie das Evakuierungstuch unter die Matratze.
- 4) Ziehen Sie die Gummibänder (2 cm breit) über die Matratzenecken.

Zuganleitung:

Anleitung: YouTube: „<https://youtu.be/CEHYISxU9u0>“

- 1) Die zwischen der Matratze und dem Bettenboden gelegten Gummibänder werden herausgezogen und über die Matratze und den Patienten derart befestigt, dass der Matratzenrand geringfügig steigt, um den Patienten zu schützen.

VERWENDEN SIE NICHT DIE GUMMIBÄNDER ZUM ANHEBEN

Die Gummibänder dienen dazu, aus der Matratze einen weichen U-förmigen Schutz für den Patienten zu machen.

- 2) Schwarzes Zugband: wenn eine zweite Rettungskraft anwesend ist, kann diese von dem schwarzen Zugband hochziehen und somit kann der Patient auf den Fußboden gehoben werden.
- 2) Fassen Sie danach den schwarzen Zuggürtel mit der roten Markierung am Ende des Evakuierungstuches und ziehen Sie den Patienten auf den Fußboden (wenn nur ein Helfer anwesend ist). Ziehen Sie den Patienten auf der Matratze an der Kopfseite in Sicherheit.

Maximale Traglast: 160 kg

Überprüfen Sie den Zustand der Zugbänder mindestens einmal, besser zweimal, pro Jahr, indem Sie leicht an den Bändern ziehen

Waschtemperatur: 80 °C

Entsorgung: soll zu einer Abfallentsorgungsanlage verbracht werden: unsortierter Abfall