

Aufbereitung und Befüllung des WiBUplus Tuchspendersystems



Vor dem erneuten Befüllen (nach Verbrauch der Tücher oder spätestens nach 28 Tagen) Vlies- und Flüssigkeitsreste entsorgen. Um eine Kontamination zu vermeiden, ist eine Aufbereitung des Tuchspendersystems vor der erneuten Befüllung unbedingt notwendig!

Diese Anleitung
und mehr
als Video online:



wibu.care/
anwendungsvideos

→ Folgende Punkte sind bei der Aufbereitung
des WiBUplus Tuchspendersystems zu beachten:



1 Schutzhandschuhe und ggf. Schutzbrille tragen. Vlies- und Flüssigkeitsreste entsorgen.



2 **Reinigung:** Alle Oberflächen (Spender, Deckel, Öffnung) mit heißem Trinkwasser (55–60 °C) aus- bzw. abspülen. Vollständig trocknen lassen.
Desinfektion: Alle Innen- und Außenseiten sowie Ränder des Spenders mit einem in sporiziden Desinfektionsmittel getränktem Einmaltuch gründlich desinfizieren. Einwirkzeiten beachten.



3 Neue Rolle aus der Verpackung nehmen und in den Eimer stellen.



4 Desinfektionsmittellösung langsam von der Mitte nach außen über der Rolle verteilen. **Alternativ:** vorgetränkte Rolle im Standbeutel einsetzen.



5 Ein Tuch aus der Mitte der Rolle durch die Öffnung im Deckel ziehen. Eimer danach sorgfältig verschließen. Erstes Tuch verwerfen.



6 Ansatz-Etikett vollständig beschriften und auf dem Deckel anbringen.



7 Nach ca. **30 Minuten** ist die Rolle vollständig durchtränkt und einsatzbereit. Eine vorgetränkte Rolle ist sofort einsatzbereit.



8 Nach **max. 28 Tagen** Standzeit restliche Tücher und Flüssigkeit entsorgen. Vorgetränkte Rollen können eine abweichende Standzeit aufweisen.