

Bedienungsanleitung



Lieferung

Packen Sie FIXALOT aus. Passen Sie beim Öffnen auf, dass die Produktoberflächen nicht durch scharfe Gegenstände beschädigt werden.



Montagezubehör

Halten Sie das Zubehör von FIXALOT bereit.

1. Gummipatte
2. Inbusschraube 6x50
3. Hutmutter M6
4. Puller
5. Inbusschlüssel



Los geht's – Eins

Setzen Sie FIXALOT auf den Handlauf. Wenn Ihr Handlauf einen Durchmesser von 38-40 mm hat, legen Sie zunächst die Gummipatte auf den Handlauf.



Zwei

Stecken Sie die Inbusschraube durch die Bohrung und drehen Sie die Schraube mit den Fingern fest.



Drei

Haken Sie den Puller in den Schlitz ein und ziehen Sie die Platte nach unten zu sich hin, damit diese gegen die Wand gedrückt wird.



Vier

Halten Sie die Spannung. Ziehen Sie mit dem Inbus die Schraube fest, bis sich die Platte nicht mehr am Handlauf bewegt.



Fünf

Drehen Sie die Hutmutter mit den Fingern auf das herausstehende Gewinde.




Sechs

Nehmen Sie die Silikonbänder und spannen Sie das Produkt Ihrer Wahl an FIXALOT fest.



Sieben

Optional - Hängen Sie die Aufbewahrungsbox in die Befestigungspunkte ein und setzen Sie eine 500-ml-Flasche Händedesinfektionsmittel in den Spender ein.

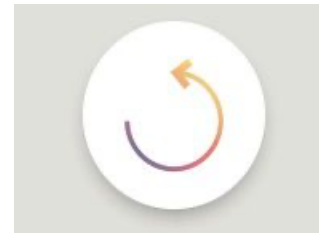

Demontage

Wiederholen Sie die Montageschritte vier bis sieben in umgekehrter Reihenfolge und lösen Sie dann mit dem Inbusschlüssel die Inbusschraube. Nachdem Sie die Schraube entfernt haben, können Sie FIXALOT vom Handlauf abnehmen.



FIXALOT TROLLEY

Stecken Sie FIXALOT TROLLEY einfach auf die Rückwand des Pflegewagens. Dann wiederholen Sie die Montageschritte sechs und sieben.



Reinigung

FIXALOT und das Zubehör kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, sowie mit handelsüblicher Flächendesinfektion gereinigt werden.