

GEBRAUCHSANWEISUNG

Matratze Prima Plus inkl. Bezug Jersey

Wir gratulieren zu dem Kauf einer Matratze aus dem Hause Lück. Sie können sich auf dieses Qualitätsprodukt verlassen. Bitte beachten Sie deshalb die Hinweise sowohl an der Matratze als auch in dieser Gebrauchsanleitung.

Zweckbestimmung:

Die Matratze unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Dekubitus-Prophylaxe.

Kontraindikation:

Keine bekannt

Medizinprodukt:

Klasse 1, MDR 2017 / 745



Einsatzbereich:

Die Matratze ist für den Einsatz in handelsüblichen Pflegebetten ausgelegt im Einsatzgebiet Krankenhaus, Pflegeheim und häuslicher Bereich.

Patientengewicht:

belastbar bis 120 kg, empfohlen 20 - 120 kg

Technische Informationen der verwendeten Materialien:

Kern:

PU-Schaumstoffe (RG40 kg/m³ / Stauchhärte 4.0 kPa)

Bezug:

Jersey (85 % Polyester / 15 % Baumwolle)

Sicherheitstechnische Hinweise Matratze:

Schadstoffgeprüft:

OEKO TEX Standard 100

Reinigungs- und Desinfektionshinweise:

Matratzenkern:

Der Matratzenkern ohne Bezug kann grundsätzlich durch den Anwender / Händler mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Die kontaminierte Stelle bzw. den ganzen Matratzenkern mit einem Desinfektionsmittel besprühen oder abwischen (z.B. ECOLAB-Schaum Spray Incidin OxyFoam S) und danach trocknen lassen. Die weiteren Anwendungs- und Sicherheitsempfehlungen des Desinfektionsmittelherstellers sind zu beachten. Alternativ ist eine Autoklavierung 75 °C VDV Kammer des Matratzenkerns möglich.

Matratzenbezug:

Der Bezug ist Waschmaschinen geeignet bis 95 °C kochfest und Wäschetrockner geeignet bei niedriger Temperatur. Pflegesymbole am Bezug sind zu beachten.



Wartung:

Es muss keine Wartung des Systems durchgeführt werden

Verpackungs- & Anwendungshinweise:

ACHTUNG! Hinweise zur Roll-Verpackung und Folien

Die Roll-Verpackung der komprimierten Matratze bitte möglichst sofort nach Erhalt öffnen. Die Matratze aus der Kartontage nehmen und die Folienverpackung entlang des Schneidschutzes (Kartonstreifen) öffnen. Die zweite Folie der ausgerollten Matratze an den Enden vorsichtig einstechen, damit die Matratze in der Folie Luft zieht und die Matratze ihre volle Größe entfalten kann.

Die Folien dienen der Verpackung und dem Transport. Bitte von Kindern fernhalten. Nicht über den Kopf stülpen.

Legen Sie die Matratze in das Bett und achten auf die Kennzeichnung der Oberseite. Es wird empfohlen die Matratze immer mit einem Laken zu nutzen. Matratzen entsprechend der Größe des Bettes einsetzen. Bei der Verwendung von Betten mit Seitengittern ist darauf zu achten, dass ein Abstand von mindestens 22cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter gewährleistet ist. Die Matratze ist ohne Beeinträchtigung bei verstellbaren Liegeflächen geeignet.

Sicherheit/Entsorgung:

Bei schwerwiegenden Vorfällen im Zusammenhang mit dem Produkt müssen sowohl der Hersteller, als auch die zuständigen Behörden im Heimatland des Nutzers informiert werden!

Die Matratze kann gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden. Das Produkt sollte vor der Entsorgung gereinigt werden um ein Kontaminationsrisiko zu verhindern.

Größe in cm	Produktgewicht	Artikelnummer inkl. PU-Bezug Jersey
90 x 200 x 12 cm	ca. 9 kg	28.648
100 x 200 x 12 cm	ca. 10 kg	28.651

Lieferumfang:

Matratze Prima Plus (Matratzenkern), Bezug Jersey (abnehmbar), Gebrauchsanweisung

Gültig für folgende Produktvarianten:

Matratze Prima Plus inkl. Bezugsvarianten Jersey