

Nutzungs- & Reinigungshinweise für WIEGAND MediBecher Multi

Allgemeines


Es ist weltweit bekannt, dass Medikationsfehler häufig vorkommen. Dieser Medikamentenbecher wurde entwickelt, um geschultes medizinisches Personal bei der korrekten Dosierung und Verteilung von Medikamenten zu unterstützen.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Medikamentenbecher auftritt, sollte der Kellpo A/S und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender niedergelassen ist, gemeldet werden.

Achten Sie auf die richtige Handhabung von Medikamenten und vermeiden Sie Unterbrechungen (richtiger Patient, richtiges Medikament, richtiger Applikation, richtige Zeit, richtige Dosis, richtige Verabreichungsform innerhalb eines bestimmten Ablaufes).

Produktbeschreibung

Der Medikamentenbecher ist für die Dosierung und Verteilung von nicht-potenten Medikamenten in Pillen-, Pulver- oder Flüssigform durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.

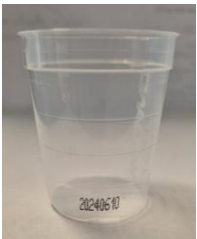

Der Medikamentenbecher hat in den Kunststoff eingegossene Volumenmarkierungen mit einer 25-ml-Skala und kann gewaschen und wiederverwendet werden, indem man das Datum auf dem Medikamentenbecher überprüft. Wenn das Datum nicht mehr sichtbar ist, kann der Medikamentenbecher nicht mehr verwendet werden. Wenn das Datum auf dem Medikamentenbecher abgelaufen ist, kann der Medikamentenbecher ebenfalls nicht mehr verwendet werden.

Warnhinweise

- Vergewissern Sie sich, dass der Medikamentenbecher sauber und trocken ist, bevor Sie ihn zur Verabreichung von Medikamenten jeglicher Art verwenden.
- Sorgen Sie für die richtige Arbeitsumgebung und -bedingungen bei der Dosierung von flüssigen Medikamenten (ebene Oberfläche und geeignetes Licht).
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die aufgedruckte Skala noch sichtbar ist.

Messskala

Die Messskala ist von 5 ml bis 25 ml in 5-ml-Schritten mit einer Genauigkeit von +/- 1 ml markiert. Um sicher zu gehen, dass die Skala den richtigen Inhalt anzeigt, sollten Sie nur in gut beleuchteten Räumen Medikamente dosieren.

Wiederverwendung

Die Becher können in einer normalen Waschmaschine bei einer Temperatur von bis zu 65°C mit normalem Waschmittel gewaschen werden. Die Becher können wiederverwendet werden, bis eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, je nachdem, was früher eintritt.

- das aufgedruckte Datum auf dem Becher ist nicht mehr sichtbar;
- der Becher ist 23 Monate ab dem aufgedruckten Datum haltbar;
- bis zu dem auf dem Etikett des Bechers aufgedruckten Verfallsdatum.

Nur Becher mit einem sichtbaren Datumsaufdruck können wiederverwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Becher vor der Wiederverwendung sauber und trocken sind.

Entsorgung der Medikamentenbecher

Die Becher bestehen zu 100% aus Polypropylen und können gemäß den örtlichen Abfallvorschriften entsorgt werden.