



# Gebrauchsanweisung

## WiBUplus Pflegematratze

Die Anlieferung erfolgt gerollt und vakuumiert im Einzelkarton, um eine einwandfreie und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten.

Durch Einsatz moderner Materialien und Technologie entstehen durch das Einrollen und Vakuumieren der Matratze keinerlei Beeinträchtigungen dieses hochwertigen Markenproduktes. Wir empfehlen, die Matratze spätestens nach ca. 3 Monaten auszupacken.

Die Matratze ist mit einem Komfort-Kombi-Bezug oder PU-Bezug ausgestattet. Den Komfort-Kombi-Bezug können Sie bei Bedarf abnehmen und die Oberseite wechseln: entweder strukturiertes, weiches Jersey-Doppeltuch oder flüssigkeitsdichter Hygienebezug.

Für Fragen und Anregungen stehen Ihnen Ihre Gebietsverkaufsleiter:innen oder unsere Kundenbetreuer:innen im Innendienst unter Telefon 04102 483-8 280 (Deutschland) oder 0732 330 188-11 (Österreich) gerne zur Verfügung.

**Indikation:** Dekubitusprophylaxe

**Anwendungsempfehlung:** 30–130 kg

**Kontraindikationen:** keine bekannt.



Bitte beachten Sie, dass bei längeren Liegedauern weitere pflegerische Maßnahmen erforderlich sind, um einen Dekubitus zu vermeiden (z. B. Um- und Freilagern)

**Inbetriebnahme:**

Nach dem Entrollen hat die Matratze innerhalb von 24 Stunden das volle Volumen zurückerlangt und ist für den Gebrauch bereit.

Kein Zusammenbau bzw. Montage notwendig. Matratze auf belüftetes Bettgestell legen. Die Matratzengröße muss zum verwendeten Bettgestell passen.

**Auf Kennzeichnung der Oberseite achten! Die mit Aufdruck „oben“ gekennzeichnete Rhombo-Therm-Auflage soll immer nach oben zeigen! Bitte beachten Sie dies, um die gesamte Ausstattung der Matratze voll auszunutzen.**



Die Folien dienen der Verpackung und dem Transport. Bitte von Kindern fernhalten. Nicht über den Kopf stülpen.

Bei schwerwiegenden Vorfällen im Zusammenhang mit dem Produkt müssen sowohl der Hersteller, als auch die zuständigen Behörden im Heimatland des Nutzers informiert werden!

Die Matratze kann gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden. Das Produkt sollte vor der Entsorgung gereinigt werden, um ein Kontaminationsrisiko zu verhindern.

**Pflegehinweise:**

**Schaumstoff-Kern:** Keine Wartung der Materialien. Empfohlen Autoklave bei 75 °C VDV Kammer, Sprühdeseinfektion ist möglich. Nach entsprechender Aufbereitung ist die Matratze wieder einsetzbar.

**PU Bezugsmaterial:** Achten Sie auf die Pflegehinweise im Bezug. Desinfektion je nach Bezugsart Wischdesinfektion und/oder Waschdesinfektion.

PU-Bezüge sind sehr gut beständig gegen Desinfektionsmittel auf Alkohollbasis. Phenol oder Phenolderivate können auch in verdünnten Konzentrationen verwendet werden (Empfehlung des Desinfektionsmittelherstellers beachten). Wir empfehlen jedoch immer, das betreffende Produkt zu testen, bevor es verwendet wird. Vor dem Wiedereinsatz die Unversehrtheit des Bezuges prüfen.



Rev 12/2025



**Lück GmbH & Co. KG**  
Vennweg 22, 46395 Bocholt, www.lueck.de



**WiBU PflegePlus GmbH**  
Gerstenstieg 6, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 483-8 280, Fax: +49 4102 483-998 280,  
pflege@wibu-gruppe.de, www.wibu.care